

Filo VX アカデミック版インストールのトラブルシューティングです。

下記を参考にインストールを行ってください。

1. [Windows 8 OS のセキュリティでブロックされる](#)
2. [「別のバージョンの製品が・・・」とメッセージが表示される](#)
3. [「お使いの Windows OS は 64bit 版です・・・」とメッセージが表示される](#)
4. [「この製品は x64 プラットフォーム用に設計されています・・・」とメッセージが表示される](#)
5. [ユーザー登録ができない](#)

上記リンク先の情報でもインストールがうまくいかない場合は、下記窓口までお問合せください。

株式会社 スペック・システム


サービス窓口

電話:044-750-0151 (代表)

平日 10:00~17:00

1. Windows 8 OS のセキュリティでブロックされてしまう

- ① Windows 8 OS で、インストール時に以下のメッセージが表示された場合は、同じ画面上の「詳細情報」をクリックします。

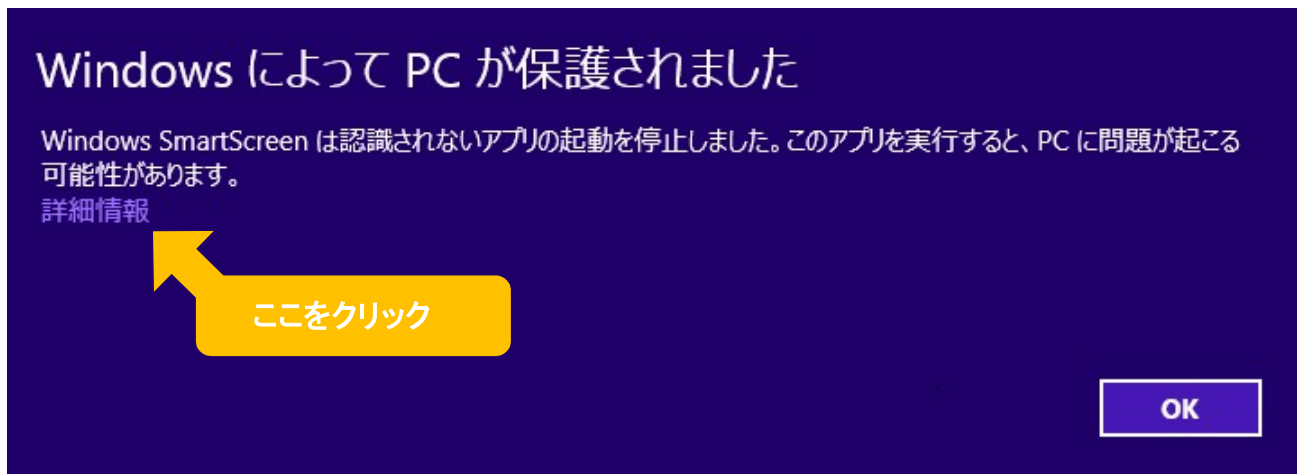


- ② 「実行」ボタンをクリックすると、インストールを再開します。




2. 「別のバージョンの製品が・・・」とメッセージが表示される

- ① Filo VX アカデミック版 (Version 1.0.0) をインストール済みの場合、以下のメッセージが表示されます。

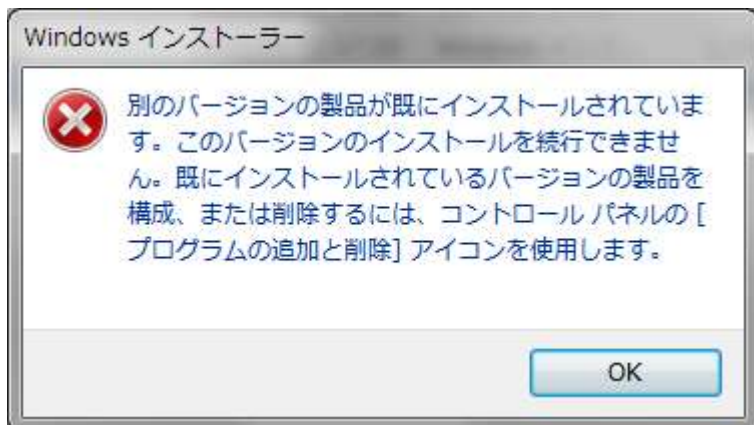

- ② Windows の「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラム」→「プログラムのアンインストール」を選択し、一覧中の「Filo VX」を右クリック→「アンインストール」を選択して一旦アンインストールを行います。

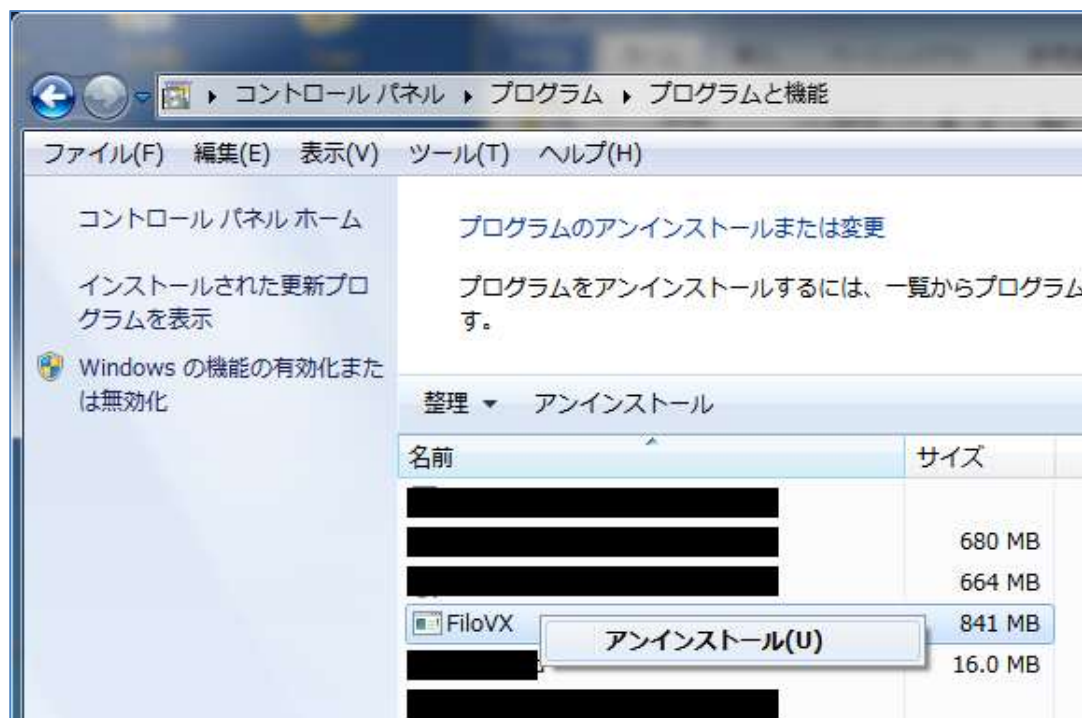

- ③ アンインストール完了後、再度、ダウンロードしたインストーラーを実行してください。

※2014年6月14-15日の春季合同学会にてDVDを無料配布致しました。

【Version.1.0.0 からの変更点】

- ・CT 値計測機能の追加
- ・Sagittal/Coronal フレームの初期画像表示サイズ変更
- ・その他バグ修正


3. 「お使いの Windows OS は 64bit 版です・・・」とメッセージが表示される

以下のメッセージが表示された場合は、ダウンロードサイトより「Filo VX アカデミック版 (64bit)」をダウンロードして、インストールしてください。



4. 「この製品は x64 プラットフォーム用に設計されています・・・」とメッセージが表示される

以下のメッセージが表示された場合は、ダウンロードサイトより「Filo VX アカデミック版 (32bit)」をダウンロードして、インストールしてください。

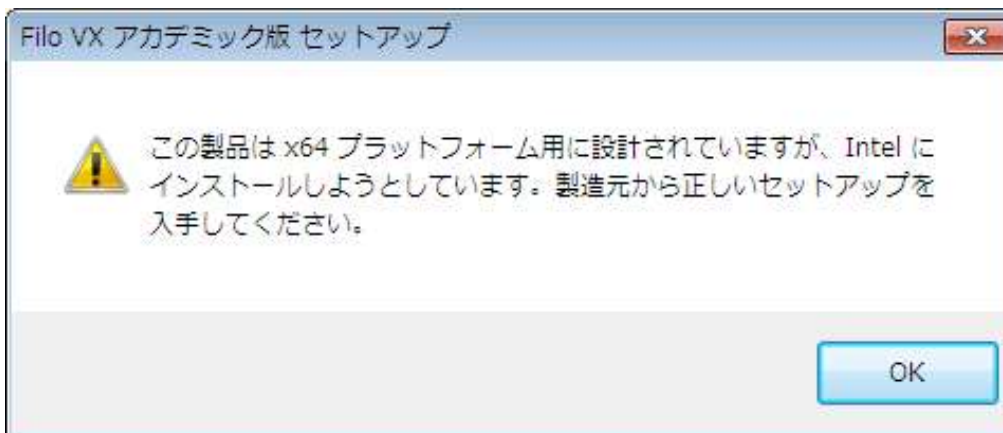

※32bit OS に対して、64bit 版インストーラーを実行した場合に表示されます。

5. ユーザー登録ができない

ユーザー登録が出来ない場合でも、ソフトウェアのインストールには問題ありません。

ユーザー登録は任意ですが、ご登録頂ける方はお名前、所属を記入の上、下記アドレスまで送付頂けますと幸いです。

宛先: Filo@specsystem.co.jp